

ガステック

アルコールチェック用 検知管セット

AC-1



■ 電源不要!

■ ポリ袋に採取した呼気を気体採取器で
吸引後、目盛を読み取るだけの簡単操作!



アルコールチェック用検知管セット

AC-1

■使用方法

- 1** 呼気採取用ポリ袋にストローを挿し込み、呼気を吹き込む




- 2** アルコールチェック用検知管を呼気採取用ポリ袋に挿し込み、気体採取器のハンドルを一気に引く




- 3** アルコールチェック用検知管の目盛を読み取る


測定前

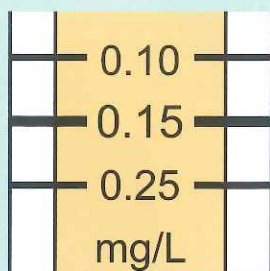

法令の基準値0.15mg/Lを超えた場合

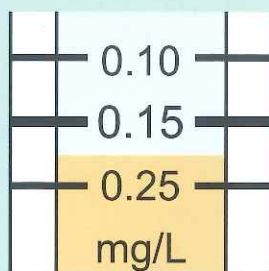

法令の基準値0.15mg/Lを下回った場合

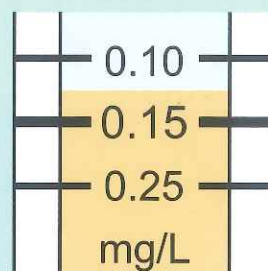

■セット内容

品名	型式	数量
気体採取器セット 気体採取器 アクセサリ一式(グリス、インレットゴム) 収納ケース、取扱説明書	GV-100S	1式
チップホルダ	722	1個
呼気採取用ポリ袋		10枚
ストロー		10本
アルコールチェック用検知管(10回分)	112AC	1箱
AC-1取扱説明書		1部

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。●性能向上のため、仕様をお断りなく変更することがございます。●商品の色は、印刷物のため実際と異なる場合がございます。

このカタログの内容は 2022 年 10 月現在です。

あらゆる気体の測定に



株式会社 ガステック

SINCE 1970

営業本部: 〒252-1195 神奈川県綾瀬市深谷中8-8-6
電話0467(79)3911(代) Fax.0467(79)3979
西日本営業所: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14新大阪グランドビル
電話06(6396)1041 Fax.06(6396)1043
九州営業所: 〒812-0066 福岡市東区二又瀬11-9パークサイドスクエア
電話092(292)1414 Fax.092(292)1424
ホームページアドレス: <https://www.gastec.co.jp/>

CASTAC1J1 22J3MP(P)